年末年始休業期間のお知らせ

年末年始の最終出荷日及び出荷開始日は下記の通りとなっております。 何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

休業期間

 $_{2023}$ 12/29(金) \sim 2024 1/3(水)



日	月	火	水	木	金	±
^{12/} 24	25	26	27 在庫があり お急ぎの ご連絡を いただいた場合の 最終出荷日	28 発送なし ご注文は录りますが、 年末年始休集明けのは何となります 通常営業日	29 年末年	30 始休業
31	1/1 元日	2	3	4 在庫があり お急ぎの ご連絡を いただいた場合の	在庫があり、 お急ぎのご連絡を いただいた場合のみ、 6日(土)着で 発送いたします	6 発送なし
年末年始休業				出荷開始日	通常出荷日	
7	成人の日	9	10	11	12	13
		通常出荷日	※欠品、天候、交通事情等により出荷が遅れる可能性がございますのであらかじめご了承ください。			

※2024年2月10日(土)についても、凍結防止のため発送いたしませんのでご承知おきください。(2月12日が振替休日であり連休になるため)

TEL 011-813-5556

FAX 0120-124-162 MAIL order@hokusan-kk.co.jp

長期休診時のお手入れ方法



特に冬季間の休診は、診療室の水回りや 配管の凍結にご注意ください。

タービン・コントラのオイル注油

□ 日常のメンテナンス同様、オイル注油をして保管する

ユニットに関して

- □ 通常のメンテナンス清掃を行う 🌄
- □ ユニットチェアを最低位に戻す →メインSWをOFFにする
- □ 水とエアーのコック(バルブ)を閉め、シリンジで水・ エアーの圧力を抜く
- □ 各種水フィルターの交換時期の確認(ユニポア等)

オートクレーブ(クラスN・クラスS)

□ ドアパッキンを清掃する(濡れ雑巾などで拭く)

オートクレーブ (クラスB)

□ 水抜きをしたあとに給水コックを閉める

機械室に関して

- □ コンプレッサー・エアードライヤー・バ キュームの電源をOFFにする
- □ コンプレッサーのタンクのエアーを抜く (ドレンコックを開く) ※ドレントラップに抜ける装備がついていない場合。
- □ バキューム分離器の清掃

レントゲンに関して

□ パノラマレントゲンまたは CTを最低位まで下げる

自動現像機がある場合

- □ 現像液・定着液を抜いて各槽を清掃し、十 分に水でゆすぐ
- □ ローラー部は洗浄後、乾燥させておく

石膏トラップ

□ 清掃した時にトラップ内の底面 までしっかり拭いてください



診療室

□ 北海道は凍結の恐れがありますので長期休暇 の場合、完全に暖房をOFFにしてしまうと凍 結の可能性がありますのでご注意ください

お休み明けに実施すること

- □ 各ユニットのスピットンの水を十分に流す (1分程度)
- □ コップの水を3杯以上流す
- □ タービン・マイクロモーター・シリンジ等の水を 十分に抜く(1分以上) ※洗浄モードがあるユニットは洗浄を実施する。
- □ コンプレッサーのタンクのドレンコックを閉める ※ドレントラップに抜ける装備がついていない場合。



北海道歯科産業株式会社 HOKKAIDO SHIKA SANGYO DENTAL SOLUTION 1952

📞 011-813-5556 | 北海道歯科産業 🔍

